

# Korte gebruiksaanwijzing voor HelpSoq Armverlenger

Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt in geen geval de uitgebreide handleiding.  
Lees deze ook goed door voordat u de Armverlenger gebruikt.

1




Neem ring rustig van de HelpSoq af met de duimen op de rand.

2



Steek ring met kous (tenen vooruit, hak van de kous naar achteren) in de Armverlenger.


3

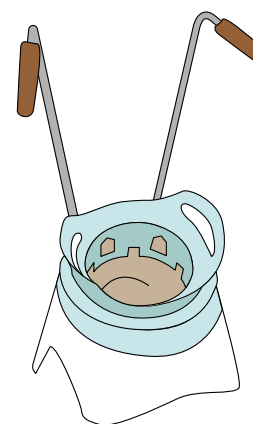

Plaats het toestel op de grond, handvatten naar je toe.


# Korte gebruiksaanwijzing voor HelpSoq Armverlenger (vervolg)

4

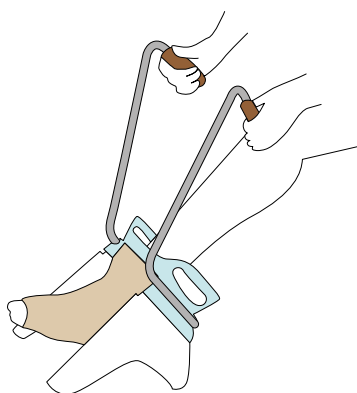


Steek de voet in de kous, tot de hiel op de juiste plek zit en houd daarbij het toestel stevig op de grond.

5

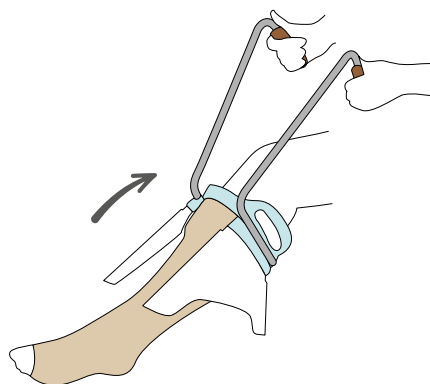

Til de handvatten omhoog, de kous rolt af op het been.

6

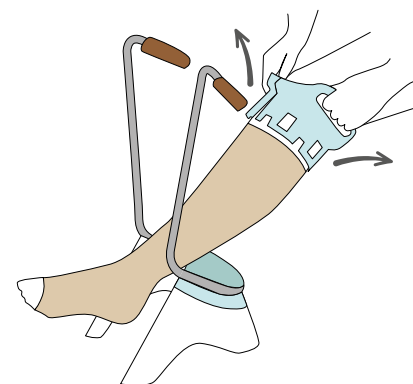

Zet de armverlenger weer op de grond. Trek de ring verder omhoog en klik open.