


Korte gebruiksaanwijzing voor HelpSoq on


Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt in geen geval de uitgebreide handleiding. Lees deze ook goed door voordat u de HelpSoq On gebruikt.

1

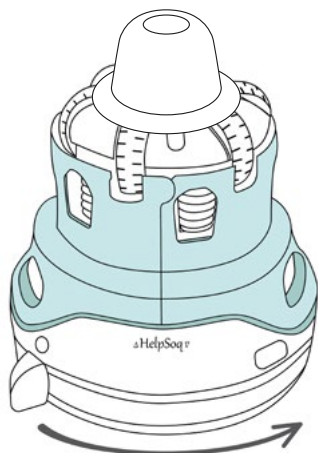


Stekker erin. Ring erop. De schuif helemaal naar rechts, de wielen gaan draaien.

2

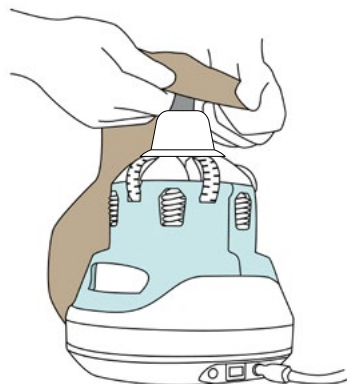

De opening van de kous loodrecht van boven af tegen de wielen plaatsen.

3

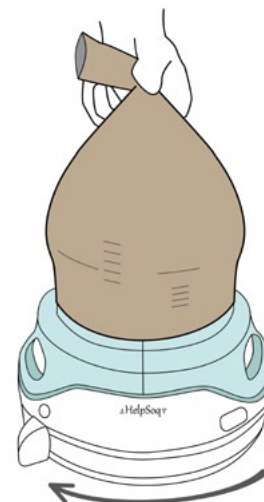

Houd de kous in een puntmuts. Is de hak helemaal op de ring? Klaar. Dus de schuif naar links.

Korte gebruiksaanwijzing voor HelpSoq on (vervolg)

4



Wrik de ring er rustig vanaf, met de duimen op de bovenkant.

5



Voet in kous steken. Met vingertoppen kous vasthouden tot de hak goed zit.

6



Vingers loslaten, ring met kous optrekken. Klaar? Klik de ring open.